


STITCHICO'S HANDLEIDING

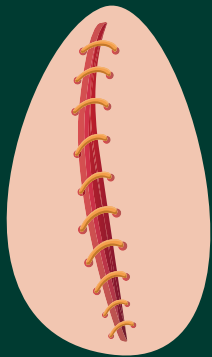

HECHTPAD

Stitchico hechtpad is vervaardigd uit siliconen van hoogwaardige kwaliteit dat menselijk weefsel realistisch nabootst. Het product is uitermate geschikt voor het oefenen met hechten vanwege zijn diversiteit aan wonden. Het product wordt vooral gekenmerkt door zijn gebruiksgemak, stabiele ligging tijdens het oefenen en een lange levensduur.

INSTRUCTIES

1. Bewaar de hechtpad zorgvuldig op een droge en koele plek. Zo voorkomt u onnodige schade aan het product of omgeving. Het product is brandgevaarlijk bij verwarming.
2. Voorkom scheuren in de hechtpad door de naald niet te oppervlakkig of te dicht op een andere insteekopening in de huid te steken.
3. Verwijder de hechtingen na het oefenen direct met een mesje, zodat het product zijn originele vorm blijft behouden.



INSTRUMENTEN

De instrumenten van Stitchico zijn vervaardigd uit mat metaal van hoogwaardige kwaliteit. Het product zijn uitermate geschikt voor het oefenen van het zetten van hechtingen en worden vooral gekenmerkt door het gebruiksgemak. De instrumenten zijn enkel bestemd voor oefendoeleinden en mogen niet gebruikt worden op mens of dier.

INSTRUCTIES

1. **LET OP!** Gebruik de Stitchico instrumenten nimmer op de menselijke of dierlijke huid.
2. Bewaar de Stitchico instrumenten in het Stitchico etui om schade te voorkomen. De Stitchico etuis zijn speciaal ontworpen voor het bewaren van deze instrumenten.
3. Voorkom frequent reinigen van de instrumenten door ze zorgvuldig op te bergen. Het menigmaal reinigen van deze producten kan namelijk leiden tot onnodige schade.



HECHTDRAAD

Stitchico Nylon is een circulair hechtdraad vervaardigd uit niet-resorbeerbaar monofilament van hoogwaardige kwaliteit. Stiticico Nylon wordt geleverd als een afzonderlijk steriel verpakte naald-en-draadcombinatie en is verkrijgbaar in verschillende naalden. Er zijn 2 verschillende naalden: een 1/2 gebogen en een 3/8 gebogen naald. De 3/8 gebogen naald is met name geschikt voor transcutane hechtingen, terwijl de 1/2 gebogen naald met name geschikt is voor intracutane hechtingen. Dit product is uitsluitend bedoeld voor scholingsdoeleinden.

INSTRUCTIES

1. **LET OP!** Het betreft een scherp product.
2. **LET OP!** Gebruik Stitchico Nylon nimmer op de menselijke of dierlijke huid.
3. Pak de naald nooit beet met de blote hand. Gebruik hiervoor een naaldvoerder.
4. Het is wenselijk om de naald na gebruik direct in een naaldencontainer weg te gooien om de veiligheid te garanderen. Mocht u toch deze willen bewaren, steek dan de naald met behulp van een naaldvoerder in een naaldenkussen om accidenten te voorkomen.